

HUMOFIT®

BAND

エフ・バンド



■特長

- ・基材にHUMOFIT®を用いる事により体温（28℃以上の温度）でゴムの様に柔らかく変形します
- ・柔らかい状態で腕などに伸ばしながら巻きつけて固定すると圧迫感なく優しくフィットします
- ・繰り返しの使用が可能で水や中性洗剤で洗う事で清潔感が保てますので廃棄物の削減に貢献します
- ・色目は白色タイプと装着しても目立ちにくい透明タイプがあります

* HUMOFIT®は三井化学ファイン株式会社の登録商標です



■製品仕様


仕様／（銘柄）	厚み（mm）	タイプ	製品巾（mm）	製品長（mm）	備考
白色バンド （F20）	0.35	S（標準）	10～200	50～800	材質：オレフィン系樹脂 ガラス転移温度：28℃
		H（穴開き）			
透明バンド （A11）	0.4	S（標準）			
		H（穴開き）			

■使用例


- ・Hタイプはサポーターや包帯の代替として（患部に直接触れないようガーゼ等の上から使用）
- ・Sタイプは皮膚や傷口を水分から保護する目的でお風呂や海水浴などでの使用（完全防水を保証するものではありません）
- ・その他チケットやICタグなどを簡易的に腕などに固定する際のバンドとして使用

■使用方法


- ①製品本体をドライヤーやヒーターまたは40℃程度の温水で温めて柔らかい状態にします
- ②温水の場合はタオルなどで水分を除去後、直ちに2～3割程度（1.2～1.3倍）に伸ばした状態で固定したい箇所に巻きつけます
- ③巻きつけた後はバンド同士（端部）を体温で温めながら少々強めに押さえる事で固定化されます
- ④取り外す際は固定部をドライヤー等で温める事により剥がし易くなります

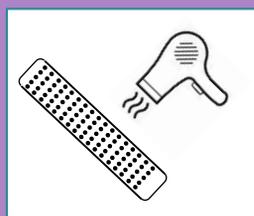


①温める

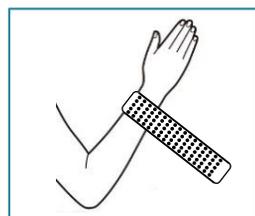

②巻き付ける

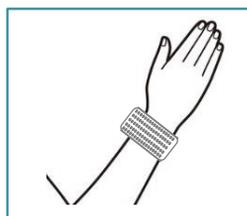

③固定する

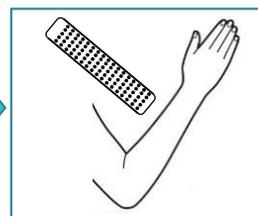

④取り外す

※注意事項

- ・ドライヤーなど熱源に近づけ過ぎて過度の高温下に晒したり2倍以上に強く伸ばしますと変形の原因となります
- ・ドライクリーニングは不可で水や中性洗剤での手もみ洗いを推奨します
- ・プールや海水浴などの比較的身体を動かす使用では剥がれ落ちる可能性があります
- ・皮膚に対する危険性は低いですが異常を感じた際には直ちに使用を中止し医師の診断を受けて下さい

2024.05

